

L'entretien des incubateurs de néonatalogie en 16 points



Avant

1. Je connais la procédure d'entretien
2. J'ai reçu une formation
3. Je choisis l'incubateur ayant la date de désinfection la plus ancienne sans que celle-ci dépasse les 15 jours

En présence de l'enfant

L'incubateur est nettoyé et désinfecté

3. Une fois par jour
4. Avant tout geste invasif
5. L'intérieur et l'extérieur
6. Avec un produit agréé pour être utilisé en présence du bébé
7. En respectant le temps de contact du produit

Hors présence de l'enfant

Nettoyage désinfection

8. L'incubateur est nettoyé désinfecté au maximum tous les 15 jours
9. Dans un local dédié ou à défaut identifié.
10. Les pièces démontables sont démontées et immergées
11. Les pièces non immergeables sont nettoyées/désinfectées avec soin

Traçabilité

12. Dans le dossier du patient : incubateurs occupés par l'enfant
13. Pour chaque incubateur : patients ayant occupé l'incubateur
14. Pour chaque incubateur date du dernier nettoyage et date limite de validité.

Stockage

15. L'incubateur désinfecté le plus récemment est stocké en dernier.
16. Aucun incubateur stocké n'a une date de désinfection supérieure à 15 jours.

Source documentaire : avis du 15 juillet 2022 relatif aux bonnes pratiques de soins aux nouveaux nés pour prévenir les infections sur dispositifs invasifs et la transmission croisée en secteur de soins de néonatalogie. SF2H